

# FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-063 • Rev.2  
Vigente desde: Feb-08-24

Este documento es emitido por Eufar, está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO



## DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL, SIN ALCOHOL PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
DE EQUIPOS



en sólo **30**  
segundos

**Acciones:**  
Bactericida  
Fungicida  
Esporicida  
Tuberculicida  
Virucida

Comprobadas  
científicamente

### Ventajas

- **EUCIDA® FREE ALCOHOL** actúa como detergente y desinfectante en mínimo 30 segundos, comprobado científicamente.
- Debido a su pH neutro, es compatible con todos los materiales.
- Incoloro e inodoro.
- Libre de aldehídos, fenoles, fósforo y alcohol.
- No tóxico, ni irritante.
- No corrosivo.
- Biodegradable.
- No mancha.
- Libre de Biguanidas

### Mecanismo de acción

Los compuestos de cloruro de amonio cuaternario se fijan a la superficie de los microorganismos inhibiendo las funciones de la pared celular y de la membrana citoplasmática y por interacción física con la membrana celular. Por esta razón, los compuestos QAS son frecuentemente usados para desinfectar superficies.

### Rendimiento

750 mL. rinden 99 m2 o 1071 aspersiones.

Para garantizar mayor rendimiento se recomienda el uso de paños descartables no absorbentes o utilizar los paños Eucida Free Alcohol.

## PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS

### ACTIVIDADES

### MICROORGANISMOS

### EVIDENCIAS

Bactericida	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	Bactericida en solo 30 segundos (Método ecométrico).
Esporicida	<i>Bacillus subtilis</i>	Esporicida en solo 30 segundos (Método ecométrico).
Virucida	<i>Hepatitis B y C</i> <i>Herpes simplex</i> <i>HIV - Varicela - Rubeola - Influenza - Sarampión</i>	Los amonios cuaternarios afectan a los virus envueltos en capa lipídica.
Fungicida <i>Hongos y levaduras</i>	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 1604	Fungicida en solo 30 segundos (Método ecométrico).
Tuberculicida	<i>Mycobacterium terrae</i> , ATCC 15755	Tuberculicida en solo 30 segundos (test de deutsche gesellschaft fur hygiene and microbiologie (dghm)).

1. RUTALA William A, Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities.2008.

2. Ewa Okblak, Andrzej Gamian, The biological activity of quaternary ammonium salts (QASs), Postepy Hig Med Dosw, 2010;64: 201-211.

# FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-063 • Rev.2  
Vigente desde: Feb-08-24

Este documento es emitido por Eufar, está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO



## DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL, SIN ALCOHOL PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS

### Descripción

- **EUCIDA® FREE ALCOHOL** Contiene mezcla de amonios cuaternarios de quinta generación como agente detergente y desinfectante y otro agente potenciador

### Instrucciones de uso

#### Desinfectante de equipos biomédicos, por contacto:

- Utilice elementos de protección personal (EPP).
- Aplique **Eucida® Free Alcohol**, así:
  - a. Asperjando Eucida® Free Alcohol sobre un paño limpio, seco y no absorbente.
  - b. O, Utilícelo listo para uso, con los **Paños Humedecidos - WIPES** con **Eucida® Free Alcohol**.
- Pase el paño en una sola dirección, sin repasar.
- Deje actuar **Eucida® Free Alcohol** por **30 segundos mínimo**. No enjuague.
- El Dispositivo Médico, Equipo Biomédico o superficie, queda listo para ser utilizado.
- Deseche el paño al final del uso.

### Aspecto físico

Solución incolora, de olor característico, libre de partículas extrañas.

### Estabilidad

Para asegurar la estabilidad y acciones del producto no adicione agua, ni mezcle con otros productos.

### Composición

Mezcla de amonios cuaternarios de quinta generación 0.3% y excipiente potenciador.

### Vida útil

Líquido / 750mL: 3 años.

Paños humedecidos: 3 años.

### Biodegradabilidad y disposición final

Terminado el contenido de este envase, enjuague, tape y envíe a reciclaje.

### Condiciones de almacenamiento

Manténgase bien tapado, en sitio fresco protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

### Precauciones

- **EUCIDA® FREE ALCOHOL** no debe mezclarse con otros productos de limpieza y desinfección.
- **EUCIDA® FREE ALCOHOL** no está indicado como antiséptico en piel o mucosas, evite el contacto.
- Ver hoja de seguridad en [www.eufar.com](http://www.eufar.com).

### Clasificación de Riesgo

IIA

### Registros sanitarios

- **Reg. (COL) INVIMA 2022DM-0026097**
- **Reg. (PER) DM27476E**

### Presentación

- Líquido / 750 mL con atomizador o tapa.
- Paños humedecidos con Eucida Free Alcohol 160 unidades.



Contáctanos

✉ [ventas@eufar.com](mailto:ventas@eufar.com)

☎ (+57) 304 462 8755

