

# SOPORTES DISPENSADORES

## Manos libres de acción con el codo


**eufar**

Soluciones Bioseguras a un click

Para BONFAR CHG 500 mL, FARBEN 65 500 mL y Litro

**FICHA TÉCNICA**  
FT-PT-ASG-041 • Rev. 03

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO

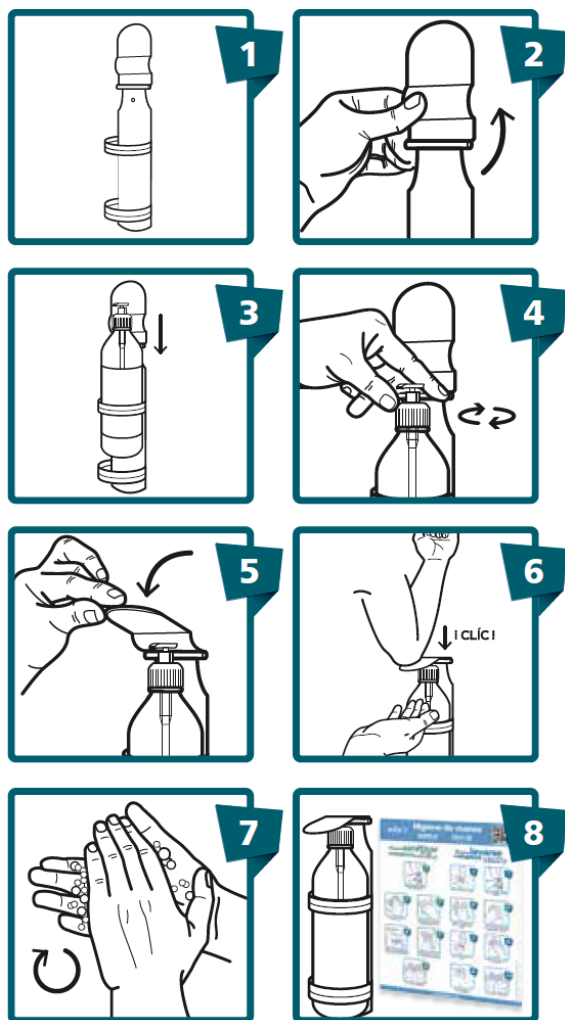

### Recomendaciones generales

- El soporte dispensador viene con 2 chazos para su instalación.
- Se recomienda instalar a una altura mínima de 1.30 m, con el fin de facilitar su acción con el codo.
- **Laboratorios EUFAR S.A.** no ofrece instalación de estos accesorios, es muy sencilla.
- Evite el reenvase de producto de una presentación grande a los envases de 500 mL o Litro; puede generarse contaminación durante este proceso y se pierde la trazabilidad de Lote y fecha de vencimiento.
- Desinfecte periódicamente con **EUCIDA Advanced** el soporte y el envase de producto.

### Indicaciones de uso

1. Ubicar el dispensador en un sitio de fácil acceso.
2. Levante la tapa del dispensador.
3. Inserte el frasco completamente.
4. Deje abierta la válvula.
5. Baje la tapa del dispensador.
6. Accione la cantidad deseada haciendo presión con el codo.
7. Realice el procedimiento indicado para limpieza de piel con Jabón Antiséptico **BONFAR CHG**; asepsia de manos, con gel glicerinado **FARBEN 65**.
8. Una vez instale el soporte dispensador, coloque el protocolo de los pasos de uso del producto según corresponda, material disponible en [www.eufar.com](http://www.eufar.com)

### Material

Acero inoxidable calibre 18

Soporte dispensador disponible para presentaciones de 500 mL y 1 litro de:  
**BONFAR CHG (500 mL) - FARBEN 65 (500 mL y Litro)**



Para comprar en línea



Distribuido por Laboratorios EUFAR S.A.  
☎ 3174019336 info@eufar.com  
Línea de servicio al cliente (571) 6254455  
Bogotá, Colombia

eufar.com



#### D Medidas

##### Litro

- A: 25cm
- B: 9cm
- C: 9,4cm
- D: 13cm

##### A 500mL.

- A: 24cm
- B: 6,5cm
- C: 6,9cm
- D: 11,5cm

